

# Vyloučení chyb při propojování setu během přechodu na nové konektory ISO standard

## PŘIPOMENUTÍ PRO LÉKAŘE

**Kontrola propojení setu od vaku s výživou, až po sondu nebo katétr zavedený k pacientovi:**

- Před připojením nebo odpojením setu nebo infuze
- Při každém přerušení, jako je nové nastavení nebo úprava terapie či kontrola správného zavedení sondy nebo katétru
- Jako součást pracovního postupu

**Postupujte dle standardů, které jsou vytvořeny pro použití jednotlivých setů, katétrů a sond, určených pro:**

- regionální anestezii (epidurální, spinální, neuroaxiální podání),
- intravenózní podání
- gastro – enterální podání



**Pokud je u pacienta několik různých přístupů nebo je zavěšeno několik vaků, sety a propojovací hadičky musí být označeny štítky na obou stranách, (distální a proximální konec) nebo jinak označeny (např. barevně).**

**Pro podání rizikových léků používejte bezpečné postupy.**

- U vysoce rizikových léků podávaných epidurální, intratekální nebo arteriální cestou, označte katétr a nepoužívejte sety nebo katetry s injekčním portem
- Zaveďte postup nezávislé dvojí kontroly

**Používejte sety a jejich příslušenství jen k tomu, k čemu jsou určeny.**

- Nepoužívejte standardní luer stříkačky pro bolusové podání enterální výživy enterální cestou
- Nepoužívejte IV sety nebo IV pumpy pro enterální výživu
- Pro IV aplikace používejte odlišné pumpy (nepoužívejte podobné pumpy pro intratekální nebo epidurální aplikace), popřípadě využijte barevných rozlišovacích štítků, umístěných na pumpách
- Používání dočasných přechodných adaptérů eliminujte na co nejkratší dobu
- Nepoužívejte sílu a vyhýbejte se improvizovaným způsobům propojení setů, sond a katétrů



**Po každém propojení okamžitě zkontrolujte vitální funkce.**



## TIPY PRO ORGANIZACI ZDRAVOTNÍ PÉČE

**Návrh The Joint Commission v rámci přípravy přechodu na nové ISO normy konektorů**

**Posouzení a odstranění současných rizik záměny, jako prevence poškození pacienta:**



- Sestavit interdisciplinární pracovní tým
- Provést zhodnocení rizika přechodu na nové sety a katetry
- Přijmout příslušná opatření

**Znalosti:**

**Poučte se o připravovaných ISO normách konektorů**

**Vytvářejte povědomí u všech pracovníků**

- lékaři
- zdravotní sestry
- dodavatelské řetězce a odbory nemocničního zásobování
- správa zdravotnické techniky
- pomocný personál

**Viz FAQ na [www.stayconnected2014.org](http://www.stayconnected2014.org)**

**Příprava:**

**Zhodnoťte a přizpůsobte stávající systémy, procesy a protokoly**


**Seznamte se s plánovaným postupem přechodu na nové ISO konektory u svých dodavatelů**



**Zavedení:**

**V přechodném období budou k dispozici vedle sebe stávající i nové konektory**

**Jakmile budou k dispozici nové konektory, nakupujte pouze příslušenství, které jsou v souladu s novou ISO normou pro konektory**

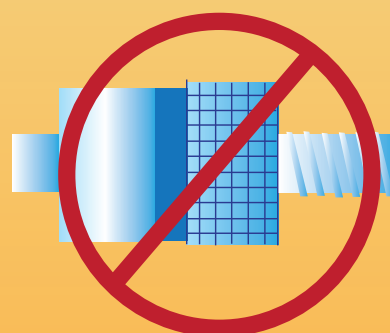

**Zajistěte v organizaci vyloučení nákupu zařízení s konektorem luer lock pro:**

- tlakové a přetlakové manžety
- neuraxiální aplikace
- enterální podání
- dýchací systémy
- aplikace plynů pod tlakem, kyslíkové a vzorkovací hadičky

